

## KONTROLA STERILIZACE chemické indikátory

### BAG Cross-Checks P

Chemický indikátor pro použití ve sterilizátorech sterilizujících plazmou peroxidu vodíku

**KATALOGOVÉ ČÍSLO:** 7532  
**POČET KS V BALENÍ:** 250

**POPIS:**

Cross-Checks P jsou proužky z materiálu Tyvek® 100 x 15 mm, s nápisem CROSS-CHECKS P, s anglickým podtextem, informujícím o barevné změně indikátoru ve sterilizátoru Sterrad®. Na obou koncích proužku je v modré barvě písmeno „V“, k němuž směřuje vždy růžová šipka. V dolní části je nápis „SteriTec“ a uvedeno číslo šarže.

Indikátor je zařazen do **třídy 1** podle ČSN EN ISO 15882, ČSN EN ISO 11140-1.

**POUŽITÍ:**

Proužek Cross-Checks P vložte spolu se sterilizovaným materiálem do sterilizátoru a odstartujte zvolený sterilizační program. Sterilizační cyklus probíhá ve výrobce

stanoveném čase: krátký cyklus 55 minut, dlouhý cyklus 75 minut. Po jeho skončení se indikátory hned vyhodnotí.

**HODNOCENÍ:**

Barevná změna písmen „V“ z modré na růžovou barvu šipek v čase 30 minut +/- 5 min prokazuje, že test byl vystaven účinkům plazmy peroxidu vodíku.

Nedojde-li k úplné barevné změně nebo nedojde-li ke změně vůbec, pak proužek nebyl vystaven účinkům plazmy nebo nebyly splněny podmínky sterilizačního cyklu.

**SKLADOVÁNÍ:**

Při teplotě 10-38°C, relativní vlhkosti 30-60%. Není vhodné skladovat indikátory blízko oxidačních činidel, např. chlor, peroxid vodíku, kyselina octová aj.

**EXPIRACE:** 2 roky od data výroby.

