

KONTROLA STERILIZACE chemické indikátory

BAG - GasCheck EO

Chemický indikátor pro monitorování sterilizace ethylenoxidem.

KATALOG. ČÍSLO: 7530

POČET KS V BALENÍ: 250

POPIS :

BAG-GasCheck EO je bílý papírový proužek o rozměrech 95 mm x 16 mm, na jehož levé straně nahoře je světlehnědý nápis BAG - GasCheck EO, uprostřed v jazyce anglickém a německém návod na vyhodnocování barevných změn po expozici testu. V pravé části indikátoru uprostřed se nachází světle hnědá šipka a úplně vpravo je světle-žlutý nápis „BAG“, který při splnění všech kritérií sterilizačního cyklu (teplota, vlhkost, čas a koncentrace plynu) se zbarví stejně hnědě jako uvedená šipka. Dále je v levé části indikátoru uvedena zkratka pro popis způsobu sterilizace, tj. sterilizace ethylenoxidem.

V levém spodním rohu je dále uvedeno číslo šarže (LOT).

Jedná se o chemický indikátor/integrátor **třídy 5** dle ČSN EN ISO 15882 a ČSN EN ISO 11140-1.

BAG-GasCheck EO je vhodný pro použití ve sterilizátorech, kde sterilizačním médiem je ethylenoxid o koncentraci 600 mg/l, sterilizační cyklus probíhá po dobu 60 minut při teplotě 55 °C a relativní vlhkosti 40-60%.

Použití:

1. Vložte BAG-GasCheck EO do sterilizačního obalu a umístěte mezi sterilizovaný materiál.
2. Odstartujte zvolený sterilizační program.
3. Po skončení sterilizačního cyklu indikátor vyjměte a vyhodnoťte.

VYHODNOCENÍ TESTU:

Parametry sterilizace splněny: písmena „BAG“ **zcela** změnila barvu z jasně žluté na hnědou.

Sterilizace nevyhovující: písmena „BAG“ změnila barvu pouze **částečně** nebo **vůbec ne**.

SKLADOVÁNÍ: v suchu při pokojové teplotě.

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

