

KONTROLA STERILIZACE

testy průniku páry

BAG - GreenCard T

Chemický indikátor pro denní Bowie-Dickovu zkoušku podle ČSN EN 867-5.
(PRO MALÉ PARNÍ STERILIZÁTORY)

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7575

POČET KUSŮ V BALENÍ: 15

POPIS:

BAG - GreenCard T je speciálně balený test pro denní monitorování a průkaz zbytkového vzduchu v malých parních sterilizátorech s frakcionovaným prevakuum (typ B, podle ČSN EN 13060). Test se provádí při teplotě 134°C 3,5 minuty. Přítomnost zbytkového vzduchu může zmařit úspěšnost procesu sterilizace. Indikátor je zataven do speciálního obalu, čímž se předchází jeho vystavení nadměrně mokré páře, jejíž přítomnost v malých parních sterilizátorech není vyloučena.

BAG-GreenCard T byl vyroben v souladu s požadavky ČSN EN 867-5 jako alternativní indikátor pro porézní náplně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Bowie-Dickova zkouška je denním testem, který se provádí v prázdné komoře sterilizátoru.

Předejte sterilizátor před odstartováním Bowie-Dickovy zkoušky.

Sestavte testovací balíček provlečením kovového kroužku, který je součástí balení, otvorem v horní části obalu, ve kterém je zataven každý BAG-GreenCard T test. Kovový kroužek zvyšuje hmotnost indikátoru, čímž zabraňuje volnému pohybu testu v komoře sterilizátoru během průniku páry a působení vakuových pulsů.

Umístěte testovací balíček do prázdného sterilizátoru.

Odstartujte program Bowie-Dick: 3,5 minuty při 134 °C. Fáze sušení by neměla trvat déle než 5 minut, akceptovány jsou i cykly bez fáze sušení.

Poznámka: Pokud je fáze sušení příliš dlouhá, indikátor může zhnědnout.

Po ukončení sterilizačního cyklu vyjměte testovací balíček, otevřete obal a vyjměte test. Ponechte kovový kroužek na další použití, obal zlikvidujte. **Pozor: Testovací balíček i kroužek mohou být horké, manipulujte s nimi proto opatrně, abyste předešli spáleninám!**

Vyhodnoťte test okamžitě po vyjmutí ze sterilizátoru a zaznamenejte výsledek. Jestliže

zbytkový vzduch není přítomen, indikátor je celý stejnoměrně zelený. Pokud zůstávají uprostřed rezidua purpurové barvy, zbytkový vzduch je přítomen.

Na zadní stranu testu zaznamenejte vyhodnocený výsledek a test uchovejte.

HODNOCENÍ:

Pokud je sterilizátor funkční, barva celého indikátoru se rovnoměrně změní na zelenou v celém vzoru. Pokud je přítomen zbytkový vzduch, střed indikátoru zůstává purpurový. V tomto případě test opakujte a ujistěte se, že byl sterilizátor předem předeříván a že nebyly shledány žádné odchylky u běžných sterilizačních cyklů, nebo volejte servisního technika.


SKLADOVÁNÍ:

Při pokojové teplotě v rozmezí 10 – 38 °C a relativní vlhkosti 10 – 60 %.

EXPIRACE:

3 roky od data výroby.

BAG-GreenCard T

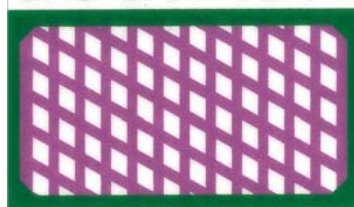

Bowie-Dick Test

INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ

BAG-GreenCard T



Bowie-Dick Test

INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI