

BAG-TwinTube

3 v 1 - systém kontroly parní sterilizace pomocí: Bowie-Dick testu, chemického emulátoru třídy 6 a biologického indikátoru v jednom zkušebním tělísku


<u>KATALOGOVÉ ČÍSLO:</u>	7580 BAG - TwinTube test device: testovací tělísko, 1ks/balení
	7581 BAG - TwinTube BD: indikátor pro dutinový BD test, 100 ks/balení
	7582 BAG - TwinTube 134 °C: ch. indikátor třídy 6 pro 134 °C, 250ks/ balení
	7583 BAG - TwinTube 121 °C: ch. indikátor třídy 6 pro 121 °C, 250ks/ balení
	7585 BAG - TwinTube starter set: (2x7580)+(8x7582 nebo7583)+(3x7581)

PŘEDNOSTI VÝROBKU

- Pouze jedno zkušební tělísko (zkušební těleso procesu - PCD), do nějž se vkládají různé indikátory: indikátor pro Bowie-Dickovu zkoušku (134 °C / 3,5 min.), zátěžový systém s emulátorem třídy 6 (121 °C nebo 134 °C), biologický indikátor
- Snadná a rychlá manipulace - indikátor se nepřekládá
- Jednoznačný výsledek - dosažení cílového pole (PASS)
- **Bowie-Dick test** odpovídá normě ČSN EN ISO 11140-1, ISO11140-4 (indikátor třídy 2)
- **Zátěžový testovací systém** s indikátorem třídy 6 odpovídá normě ČSN EN ISO 11140 a simuluje sterilizaci dutých nástrojů a detekuje nedostatečné působení času a teploty, stejně tak jako nedostatečné odzdušnění během sterilizace
- Využívá kvalitní indikátory třídy 6 pro zátěžovou zkoušku
- Zkušební tělísko je vhodné i pro použití bioindikátorů (BAG-BioStripů nebo BAG-BioCheck-„self-contained“ bioindikátorů)
- Pevné, kovové, bezúdržbové zkušební tělísko

Použití:

1. BAG-TwinTube - zkušební tělísko otevřete odšroubováním uzávěru a vložte příslušný test (Bowie-Dick test, chemický indikátor 121 °C nebo 134 °C nebo biologický indikátor).
2. Zkušební tělísko položte do sterilizátoru tak, aby se nekutálelo (využijte plošku na konci těla) a spusťte sterilizační cyklus.
3. Po skončení sterilizačního cyklu vyjměte BAG-TwinTube zkušební tělísko ze sterilizátoru, odšroubujte uzávěr (Pozor! kovový váleček může být horký!) a vyjměte indikátor.
4. Vyhodnoťte indikátor - zda barva indikátoru dosáhla cílového pole (PASS).
5. Výsledky zaznamenejte do dokumentace.

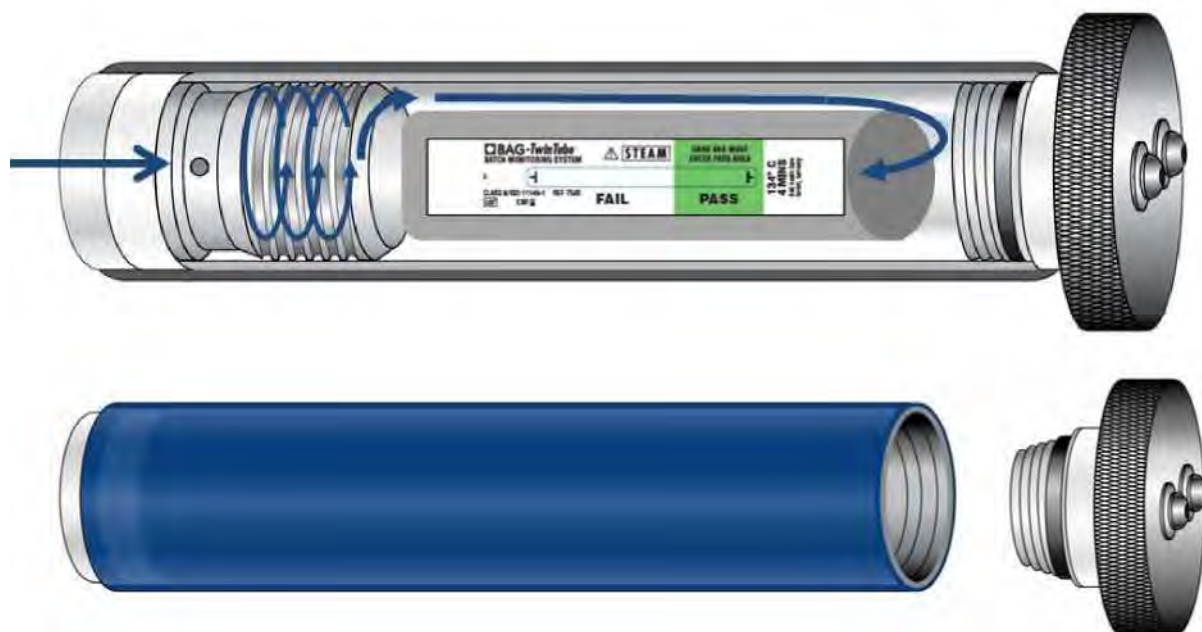


DO ZKUŠEBNÍHO TĚLÍSKA BAG-TWINTUBE (KAT.Č.7580) LZE POUŽÍT TYTO INDIKÁTORY:

BAG-TwinTube BD: kat.č.7581, indikátor pro Bowie-Dickovu zkoušku, 100 indikátorů v 1 balení.

SKLADOVÁNÍ: v originálním obalu na suchém místě, při pokojové teplotě 15-27 °C.


Expirace: 3 roky od data výroby

PŘED EXPOZICÍ

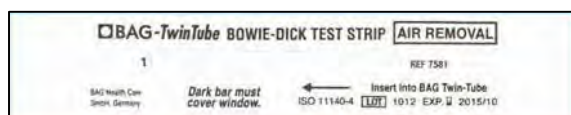


vyhodnocení BAG-TWINTUBE BD - PO EXPOZICI

Sterilizační podmínky **splněny**

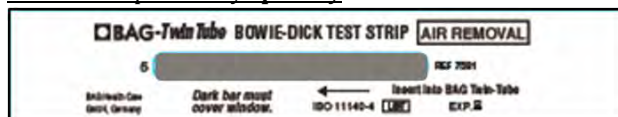

Barva indikátoru (modrá až černá/šedočerná) zcela zaplnila testovací pole.

Sterilizační podmínky **nebyly splněny**

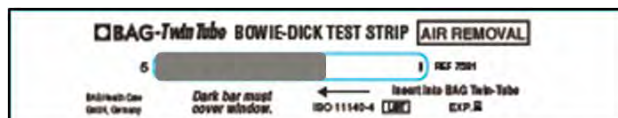

Barva indikátoru zaplnila pouze část testovacího pole.

2. BAG-TwinTube 121°C / 134°C


BAG-TwinTube 121°C: kat.č.7583, chemický indikátor třídy 6 pro 121°C, 250 indikátorů v 1 balení

BAG-TwinTube 134°C: kat.č.7582, chemický indikátor třídy 6 pro 134°C, 250 indikátorů v 1 balení

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové teplotě při pokojové teplotě 15-27 °C.


EXPIRACE: 3 roky od data výroby

PŘED EXPOZICÍ

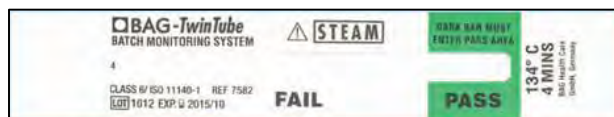


vyhodnocení BAG-TWINTUBE 121°C / 134°C (ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA) - PO EXPOZICI

Sterilizační podmínky **splněny**

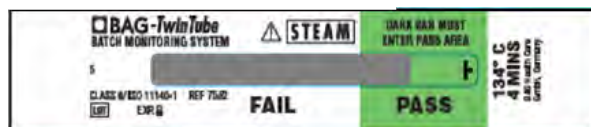

Barva indikátoru (modrá až černá/šedočerná) dosáhla cílového pole PASS (cílové pole nemusí být zcela zaplněno barvou).

Sterilizační podmínky **nebyly splněny**

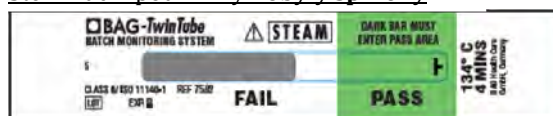

Barva indikátoru nedosáhla cílového pole PASS.


3. Biologické indikátory: BAG-BioStrip a BAG-BioCheck

BAG-BioStrip: biologický indikátor pro parní sterilizaci, kat.č.7478, 100 indikátorů v 1 balení

BAG-BioCheck: self-contained bioindikátor pro parní sterilizaci, kat.č.7483, 100 indikátorů v 1 balení

UPOZORNĚNÍ

V PRŮBĚHU ROKU 2015 DOIDE POSTUPNĚ KE ZMĚNĚ DESIGNU A OZNAČENÍ INDIKÁTORŮ PRO SYSTÉM TWIN TUBE.

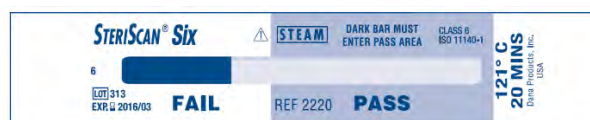

Indikátory se již nadále nebudou jmenovat Twin Tube, ale SteriScan.

Použití, vyhodnocení, kvalita i cena zůstávají nezměněné, stejně jako katalogová čísla. V případě nejasností neváhejte kontaktovat naše prodejce.

VÍCE INFORMACÍ O BAG-TWINTUBE, JEHO POUŽITÍ A ZVÝHODNĚNÝCH BALÍČCÍCH ZÍSKÁTE OD NAŠICH PRODEJČŮ.